



PRODUKTINFORMATION

REV. 26/07/2021
Ersetzt Version 15/04/2021

Ultrana HaftFIX

Klebelotion für medizinische Kompressionsstrümpfe

WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - ALS ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN!

Ultrana HaftFIX ist eine spezielle wasserlösliche Klebelotion für die Befestigung von medizinischen Kompressionsversorgungen an Armen und Beinen.

Inhaltstoffe:


- Propan-2-ol,
- Aqua,
- Polyvinylpyrrolidon,
- Glycerin

ANWENDUNG:

Vor der Anwendung muss die Haut trocken und sauber sein, alte Klebereste von einer vorherigen Anwendung sollten von Arm und Bein sowie von dem Kompressionsstrumpf entfernt werden. Ziehen Sie die medizinische Kompressionsversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers der Kompressionsversorgung wie üblich an. Legen Sie den Rand nach unten um und tragen Sie den Klebstoff mit der Roll-on Kugel auf die freigelegte Haut auf (nicht auf den Strumpf - A. und C.). Ein einmaliges Auftragen der Klebelotion rund um den Arm oder das Bein herum ist ausreichend. Klappen Sie anschließend den Strumpfrand wieder hoch und drücken Sie ihn an die Haut an.

Bei Strümpfen mit einem Silikonrand sollte die Klebelotion nicht direkt unter diesem aufgetragen werden.

Bei flachgestrickten Kompressionsversorgungen sollte die Klebelotion in zwei Längsstreifen (senkrecht, beidseitig) auf die Haut aufgetragen werden (B. und D.).

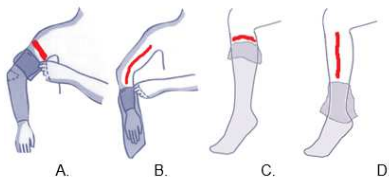

Anwendungsdauer: Die Klebelotion ist für den täglichen Gebrauch geeignet.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Reinigungshinweise: Reste der Klebelotion lassen sich mit Wasser mühelos von der Haut oder dem Strumpf abwaschen. Zusätzliche Reiniger oder Desinfektionstücher sind nicht erforderlich. Entfernen Sie Klebereste von der Haut nach dem Ausziehen des Kompressionsstrumpfs. Waschen Sie die Kompressionsversorgung gemäß den Vorgaben des Herstellers. **Ultrana HaftFIX** ist wasserlöslich, enthält weder Farb- noch Parfümstoffe und hinterlässt keine Flecken.

Besondere Hinweise: Zum Ausziehen kann der Kompressionsstrumpf an den Klebestellen vorab mit einem nassen Lappen angefeuchtet werden. Dadurch löst sich der Kleber und erleichtert das Ausziehen. Schweiß, andere Flüssigkeiten, Hautpflegeprodukte oder Wasseraktivitäten können zu einem Verlust der Haftkraft des Klebers führen, so dass **Ultrana HaftFIX** möglicherweise erneut aufgetragen werden muss. Die Klebelotion ist nicht für die Klebeverbindung zwischen zwei oder mehr Kompressionsversorgungen konzipiert.

Warnungen/ Kontraindikationen:

- Entzündete oder nässende Hauterkrankungen (inkl. Neurodermitis)
- Offene Wunden
- Unverträglichkeit auf die Inhaltstoffe
- Nicht in Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (Nikotinpflaster, Lotionen, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes / Öle, etc.). Nicht auf Piercings, tätowierte Haut sowie Infusionsschläuche auftragen.


Verkaufseinheit

Karton mit 20 Roll-on-Sticks à 60 ml
Artikel Nr. 4290007320






PRODUKTINFORMATION

- Bei Verletzungen oder Unverträglichkeitsreaktionen oder Unwohlsein ziehen Sie den Strumpf aus und reinigen Sie die Haut gründlich mit Wasser.
- Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden!
- Klebelotion nicht in Kontakt mit Augen bringen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
- Klebelotion nicht verschlucken. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.
- Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit **Ultrana HaftFIX** Kleberlotion sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem sich der Benutzer befindet.
-  Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

-  Halten Sie die Rollkugel bei Anwendung stets sauber. Das Produkt ist nur für die Verwendung durch einen einzigen Benutzer vorgesehen.
- Bei einer falschen Dosierung/Anwendung von **Ultrana HaftFIX** Kleberlotion kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse gegeben werden.
- Kinder und Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen müssen durch Pflegepersonal oder Angehörige in der Anwendung unterstützt werden.
- Halten Sie vor der Anwendung Rücksprache mit Ihrem Arzt, falls Sie Medikamente einnehmen, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.) oder Ihre Haut durch Verletzungen, Irritationen, Behandlungen etc. beeinträchtigt ist.
- Für eine optimale Haftung ist es empfohlen, die Hautfläche, auf der die Kleberlotion aufgebracht wird, vor der Anwendung zu rasieren oder zu enthaaren. **Ultrana HaftFIX** nicht direkt nach der Rasur auftragen, um Hautreizungen und -sensibilisierungen zu vermeiden.
- Nach der Anwendung von **Ultrana HaftFIX** Kleberlotion muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Klebelotionsrückstände zu entfernen.



Weitere Hinweise auf der Innenseite des Etiketts beachten oder im Sicherheitsdatenblatt unter www.ultrana.de.

Bei Unfall oder Unwohlsein erhalten Sie 24 h unter der Giftnotrufnummer +49 761 19240 Auskunft.

Haltbarkeit, Gewährleistung, Transport und Lagerung, Entsorgung



Bitte schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit. Wir empfehlen die Aufbewahrung bei Raumtemperatur. Das Produkt sollte stets gut verschlossen, stehend gelagert und transportiert werden. Wegen Materialalterung kann die Leistungsfähigkeit der Kleberlotion nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet werden. Das Haltbarkeitsdatum der Kleberlotion ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr als Kleberlotion verwenden. Bewahren Sie das Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche auf.



Die Kleberlotion und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.



Ultrana GmbH
Mackstraße 112
88348 Bad Saulgau
Email: info@ultrana.de
Homepage: www.ultrana.de
Tel. +49 7581 / 2007-298
Fax +49 7581 / 2007-685



4290007320



UDI-DI (PPN)110321095658

PZN
UFI Nr.
Hilfsmittel-Nr.

3210956
F9X1-G0A2-F009-6CK6
17.06.07.0008

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



PRODUKTINFORMATION

Gefahrensymbol gemäß ADR: Gefahrensymbol gemäß CLP:



ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Propan-2-ol)

Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Enthält: Isopropyl Alkohol.

DOC. 2.02-01 Gebrauchsanweisung IFU Haft Fix_2021.07.26.docx
Revision:2021.07.26

Symbolerklärungen



Hersteller: zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an



MD Medizinprodukt zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Medizinprodukt handelt



Unique Device Identification



Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Produkt selbst angebracht werden.



Gebrauchsanweisung beachten Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.



Artikel Nummer, siehe Aufdruck Etikett



Chargen Nummer, siehe Aufdruck Etikett



Leere Verpackung kann über Wertstoffe entsorgt werden



Von Sonnenlicht fernhalten



verwendbar bis, siehe Aufdruck Etikett (Monat. Jahr)



CE-Konformitätskennzeichnung



bezeichnet ein medizinisches Gerät, das bei einem einzelnen Patienten mehrfach verwendet werden kann.

Ultrana GmbH stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.